

## インプラントには きめ細かなお手入れを

細部までお手入れのいき届いた口腔衛生を保つことにより、インプラントは長期間にわたって機能し、快適で満足できるものになります。

### セルフケアと定期検診

- インプラント治療後の人工歯は、ご自身の歯と同じように機能します。新しい歯は、日々の口腔ケアによってお手入れをしてください。毎食後の歯磨きが必要で、特に朝食後と夜は大切です。やわらかい歯ブラシを使い、定期的に取り替えてください。
- 歯磨きはそれぞれの歯に行ってください。咀嚼する面はもちろんのこと、表側と裏側も磨いてください。歯と歯の間をきれいにすることも大切です。デンタルフロスまたは歯間ブラシなど、歯科医師が推奨する器具を使用し、時間をかけて丁寧にお手入れしてください。
- 専門家によるメンテナンスも大切です。歯科医師は口腔衛生状態をもとに、患者さんに合った定期検診のスケジュールを提案します。また、患者さんがインプラントの歯のケアに必要な器具、手順について良く理解できるよう、適切なお手入れの方法を説明します。



## ストロマン：世界で 信頼されるブランド

### 安心につながる近道は、ない。

ストロマンの誇り。それは、科学的エビデンスに重きをおく研究開発の姿勢です。患者さんのQOLを高めるために。ストロマンの追究は、今日も続いています。

- ストロマン社はスイスのバーゼルを本拠地とし、インプラント歯科学、修復歯科学、口腔組織再生の領域のグローバルリーダーです。
- 60カ国以上の国々で展開し、従業員数は2,500人を超えるグローバル企業です。
- 世界で500万人以上の患者さんがストロマン インプラントによる治療を受けています。
- スイスの精密な技術と徹底した品質管理のもとに製品は作られています。
- 50年にわたる調査と研究に支えられています。
- グローバルな非営利学術組織であるITI (International Team for Implantology) とのパートナーシップにより、学術的な裏付けのある製品を提供しています。

### ■ お問い合わせは当医院まで

この小冊子の情報は、インプラントに関するいくつかの基本的な情報を提供するためのものであり、歯科医師によるアドバイスに代わるものではありません。インプラント治療は、すべての患者さんに適用するものではありません。ご自身に適した治療方法を担当医にご相談ください。

JPC0426/2010.08 70K NP

 **straumann**

## GET BACK YOUR NATURAL SMILE インプラントのアフターケア

NEW QUALITY OF LIFE WITH DENTAL IMPLANTS



**SIMPLY DOING MORE**

## インプラント治療について

インプラント治療のような手術を伴う歯科治療には、適切なお手入れとメンテナンスが必要不可欠です。このパンフレットでは、インプラント埋入手術後に気をつけていただきたいことについてご案内します。

### 手術と治癒期間

- インプラントは局所麻酔下で顎の骨に埋め込まれます。次に、手術で切開した部分を縫合し、7-14日後に抜糸します。

### 仮歯

- 個々の患者さんの状態により、治癒期間中はインプラントにヒーリングキャップまたは仮歯（クラウン、ブリッジ、義歯など）を取り付けます。
- 仮歯に不具合が生じた場合は、担当医にご連絡ください。

## 手術後の副作用

インプラント治療における副作用の発生は非常にまれですが、何らかの問題が認められた場合には、適切な対処が重要です。

### 手術後の出血

- 出血がある場合は、頭の位置を高く保ち、ガーゼのパッドを30分程度噛んでください。（この間、パッドは取り替えないでください）

### 手術後の腫れ・痛み

- 手術後に腫れ・痛みがある場合は、手術部位をアイスパックなどで軽く冷やしてください。痛み止めなどの薬は、定められた用量・用法を守って服用してください。

### 以下のような症状がある場合は、担当医にご連絡ください

- 不快感、腫れや痛みが手術後数日間経っても続く
- 出血が止まらない
- その他何か異常を感じた場合

## 手術後の注意点

### 口腔内のお手入れ

- 手術部位を舌や指で触らないようにしてください。
- 担当医の指示があるまで手術部位の歯磨きは行わないでください。
- 手術当日は口をあまりゆすがないでください。

### 飲食・運動

- 熱い飲み物は避けてください。
- 手術部位での食事は避け、手術当日はなるべくやわらかいものを食べてください。
- アルコール、カフェイン類は控えてください。
- 激しい運動は避けてください。

### その他

- 入浴は避け、シャワー程度にしてください。
- 喫煙は避けてください。
- 日中は頭をなるべく起こしたままの位置に保ち、就寝時は手術した側を下にしないようにしてください。

その他、手術後の注意点に関して何かご不明な点、ご質問がある場合は、担当医までご相談ください。

